

Sześć prostych kroków do oznaczenia poziomu glukozy we krwi.



1. Przygotuj nakłuwacz, naciśnij przycisk naciągający, aż poczujesz opór. Przycisk zwalnający zmieni kolor na żółty.



2. Włóż pasek testowy do glukometru w kierunku wskazanym strzałkami. Glukometr włączy się automatycznie.



3. Upewnij się, że numer kodu na wyświetlaczu jest zgodny z numerem kodowym na opakowaniu pasków testowych.



4. Gdy na wyświetlaczu pojawi się migający symbol kropli, nakłuj opuszkę palca, aby uzyskać próbkę krwi.



5. Dotknij kroplę krwi przednią krawędzią żółtego okienka absorpcyjnego znajdującego się na pasku testowym. Na wyświetlaczu zacznie migać symbol klepsydry, gdy test paskowy będzie miał ilość krwi wystarczającą do wykonania pomiaru.



6. Po około 5 sekundach na wyświetlaczu pojawi się wynik. Po zakończeniu pomiaru usuń zużyty pasek testowy.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi i użytkowania systemu Accu-Chek Performa Nano dostępne są w instrukcji obsługi.